




PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved. PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

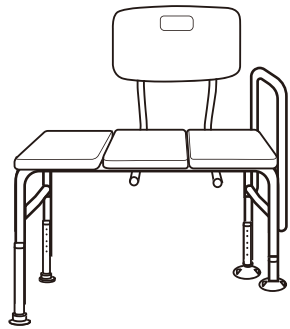

ITEM/ARTÍCULO #4979495
MODEL/MODELO #SC-80204

TRANSFER BENCH
BANCO DE
TRANSFERENCIA

SG24661

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us at:
866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday
- Sunday or **ascs@lowes.com**.
¿Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-389-8827, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m.,
hora estándar del Este, o escriba a **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this PROJECT SOURCE product. We've created these easy-to-folow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of puting it ogether. But, if you need more information than what is provided here, please visit Lowes.com, search the item number and refer to the Guides & Documents tab on the product's page.

Gracias por comprar este producto PROJECT SOURCE. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite Lowes.com, busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
The four feet are not stable and shaking. Las cuatro patas no son estables y tiemblan.	1. The four feet are not stable and shaking. Las cuatro patas no son estables y tiemblan. 2. Screws are not tightened. Los tornillos no están apretados.	1. All adjustable legs are snapped in the same respective hole position. Todas las patas ajustables se encajan en la misma posición de los orificios. 2. Tighten all screws. Apriete todos los tornillos.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY/GARANTÍA LÍMITADA DE UN AÑO

• This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This One Year Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable. Parts found to be defective or damaged can be easily ordered by calling Customer Service at **866-389-8827**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday-Sunday, or at **ascs@lowes.com**. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer or purchaser must be made available for all warranty claims.

• Este dispositivo se fabricó según estándares exactos y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de un año es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra certeza para el consumidor de años de servicio confiable. Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido al mal uso o la negligencia del propietario. ni al desgaste normal. La garantía no se extiende a los componentes perecederos. Las piezas que se consideren defectuosas o dañadas pueden pedirse fácilmente llamando al Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.hora estandar del Este, o escribiendo a **ascs@lowes.com**. El comprador o cliente original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean with a soft, damp cloth only. DO NOT USE scrub pads, detergents or cleansers as they may harm the protective finish of your bath accessories.
- Limpie solo con un paño suave humedecido. NO USE almohadillas para frotar, detergentes ni limpiadores, ya que pueden dañar el acabado protector de sus accesorios para baño.


PREPARATION/PREPARACIÓN

- Before beginning assembly, remove all parts from carton. Compare pats with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to mount or use the product.
- Antes de comenzar a ensamblar, retire todas las piezas del empaque, Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente montar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

- **Estimated Assembly Time:** Approximately 20 minutes.


- **Tiempo estimado de ensamblaje:** aproximadamente 20 minutos.

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED)/HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO SE INCLUYEN):

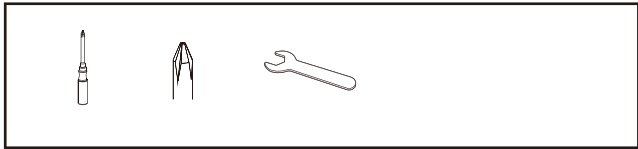

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/¿SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit www.lowes.com for more information. / Para obtener más información, visite www.lowes.com.

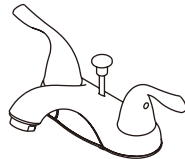

Printed in China
Impreso en China

SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer / carrier for further instructions.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños durante el transporte antes del ensamblaje. Si hay daños durante el transporte, NO LO USE. Póngase en contacto con el distribuidor o transportista para obtener más instrucciones.

- Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
- Asegúrese de que los botones a presión de ajuste de altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio respectivo de cada extensión de pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas queden bloqueadas de forma segura en su posición y se logre una altura uniforme.

- Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
- Revise las puntas de goma de las extensiones de las patas para ver si están rascadas, desgastadas o si no están en su lugar. Reemplace inmediatamente las puntas de goma si existe alguna de estas imperfecciones.


- All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
- Las cuatro extensiones de las patas con puntas de goma DEBEN tocar el suelo simultáneamente en todo momento.

- DO NOT stand on chair.
- No se pare en la silla.


- DO NOT fasten screws tightly before having assembled all the parts. All screws shall be secured after finishing the product assembly.
- No apriete los tornillos con fuerza antes de haber ensamblado todas las piezas. Todos los tornillos se asegurarán después de finalizar el montaje del producto.

- If it's hard to move legs with suction cups, you can pull tab on the suction cup to release them.
- Si le resulta difícil mover las patas con ventosas, puede tirar de la pestaña de la ventosa para liberarlas.

PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

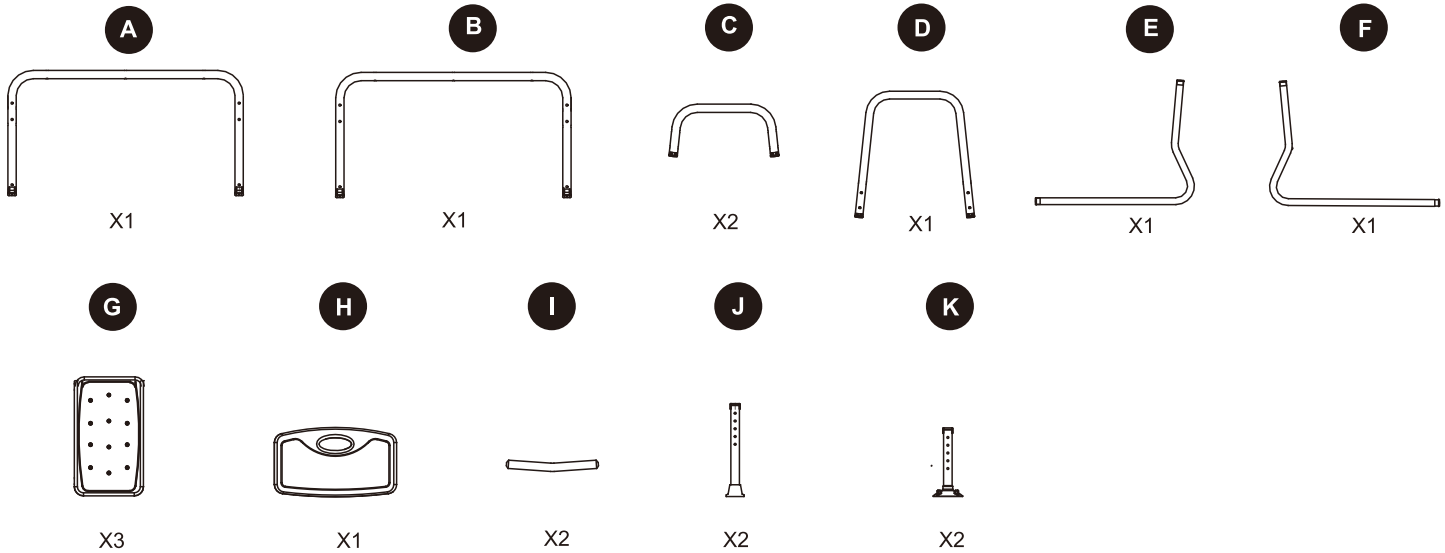

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

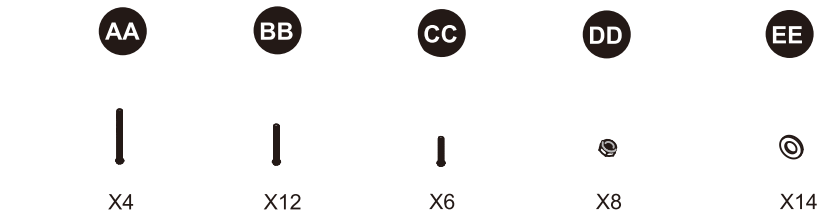

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

1 DO NOT fasten screws tightly before having assembled all the parts together.
No apriete los tornillos con fuerza antes de haber ensamblado todas las piezas.

Lay backrest panel (H) upside down on a flat surface. Attach backrest tubing (E) labeled E to the right side of backrest panel (H) by turning screws (CC) into holes, and repeat for backrest tubing (F) labeled F. Coloque el panel del respaldo (H) boca abajo sobre una superficie plana. Conecte el tubo de soporte del respaldo (E) con la etiqueta E al lado derecho del panel del respaldo (H) girando los tornillos (CC) en los orificios y repita lo mismo con el tubo de soporte del respaldo (F) con la etiqueta F .

2 Holes for armrest installation
Los orificios para la instalación del apoyabrazos

Lay seat panel (G) upside down on a flat surface. Attach frame tubing (A) & (B) to seat panel (G) by placing wave washers (EE) onto the shaft of screws (CC) and turning the screws (CC) into holes. Make sure the push buttons on frame tubing (A) & (B) standing face to face. And holes for armrest installation need be on the right side. Coloque el panel del asiento (G) boca abajo sobre una superficie plana. Conecte los tubos de la estructura (A) y (B) al panel del asiento (G) colocando arandelas onduladas (EE) en el eje de los tornillos (CC) y girando los tornillos (CC) en los orificios. Asegúrese de que los botones de los tubos de la estructura (A) y (B) estén frente a frente. Y los orificios para la instalación del apoyabrazos deben estar en el lado derecho.

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

3

Place 2pcs seat panels (G) under frame tubing (A) & (B) and backrest tubing (E) & (F) crossing over frame tubing (A) & (B), then place wave washer (EE) onto the shaft of screws (BB) and turning the screws (BB) into holes.
Note: Backrest is reversible to accommodate left or right tub entry. If backrest panel faces backwards, it means left tub entry. Coloque 2 paneles de asiento (G) debajo de los tubos de la estructura (A) y (B) y los tubos de soporte del respaldo (E) y (F) cruzados sobre los tubos de la estructura (A) y (B), luego coloque la arandela ondulada (EE) en el eje de los tornillos (BB) y gire los tornillos (BB) en los orificios. Nota: el respaldo es reversible para acomodar la entrada izquierda o derecha de la bañera. Si el panel del respaldo mira hacia adelante, significa entrada izquierda a la bañera. Si el panel del respaldo mira hacia atrás, significa entrada derecha a la bañera.

5

Turn transfer bench right side up. Attach V-shaped tubing (I) to U-shaped tubing (C) by turning screws (AA) into lower holes, and repeat for second V-shaped tubing. Make sure its V-shape facing upwards. Gire el banco de transferencia hacia arriba. Conecte el tubo en forma de V (I) al tubo en forma de U (C) girando los tornillos (AA) en los orificios inferiores y repita para el segundo tubo en forma de V. Asegúrese de que su forma de V mire hacia arriba.

7

Fasten all screws tightly, and place legs with suction cups into bath tub. Apriete bien todos los tornillos y coloque las patas con ventosas en la bañera.

4

Attach U-shaped tubing (C) to frame tubing (A) & (B) by passing screws (BB) through holes, which are close to seat panels (G) and placing wave washers (EE) onto the shaft of screws (BB), then turning nuts (DD) onto the shaft of screws (BB). Repeat for second U-shaped tubing (C). Note: If it doesn't work, you can loosen slightly all screws on seat panels to fix it. Fije el tubo en forma de U (C) al tubo de la estructura (A) y (B) pasando los tornillos (BB) a través de los orificios, que están cerca de los paneles del asiento (G) y colocando arandelas onduladas (EE) en el eje de los tornillos (BB) y, a continuación, girando las tuercas (DD) en el eje de los tornillos (BB). Repita lo mismo con el segundo tubo en forma de U (C). Nota: si no funciona, puede aflojar ligeramente todos los tornillos de los paneles del asiento para fijarlo.

6

Attach armrest (D) to frame tubing (A) & (B) by passing screws (BB) through holes and placing wave washers (EE) onto the shaft of screws (BB), then turning nuts (DD) onto the shaft of screws (BB). Make sure armrest arcs outward, not inward. Attach adjustable leg (K) with suction cup, which need be on the side where armrest (D) exists, by depressing the pin button and sliding over frame tubing until pin button protrudes. Adjust height accordingly and repeat for second leg. Attach adjustable leg (J) to the other side of frame tubing as in the same steps. Conecte el apoyabrazos (D) al tubo de la estructura (A) y (B) pasando los tornillos (BB) a través de los orificios y colocando arandelas onduladas (EE) en el eje de los tornillos (BB), luego girando las tuercas (DD) en el eje de los tornillos (BB). Asegúrese de que el apoyabrazos se arquee hacia afuera, no hacia adentro. Conecte la pata ajustable (K) con ventosa, que debe estar en el lado donde existe el apoyabrazos (D), presionando el botón del pasador y deslizando sobre el tubo de la estructura hasta que sobresalga el botón del pasador. Ajuste la altura en consecuencia y repita para la segunda pata. Conecte la pata ajustable (J) al otro lado del tubo de la estructura como en los mismos pasos.