




**PROJECT
SOURCE**

PROJECT SOURCE and logo design are trademarks or registered trademarks of LF, LLC. All rights reserved.
PROJECT SOURCE y el diseño del logotipo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de LF, LLC. Todos los derechos reservados.

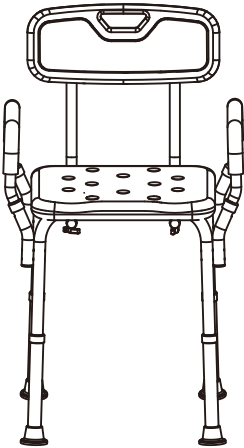

ITEM/ARTÍCULO #5711839
MODEL/MODELO #SC-80206

ADJUSTABLE SHOWER
CHAIR WITH ARMRESTS
SILLA DE DUCHA AJUSTABLE
CON APOYABRAZOS

SG24201

Questions, problems or missing parts?
Before returning, contact us on:
866-389-8827, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday - Sunday or **ascs@lowes.com**.
Preguntas, problemas o piezas faltantes?
Antes de volver a la tienda, póngase en contacto al:
866-389-8827, de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m., hora estándar del Este, o escriba a **ascs@lowes.com**.

Thank you for purchasing this PROJECT SOURCE product. We’ve created these easy-to-follow instructions to ensure you spend your time enjoying the product instead of putting it together. But, if you need more information than what is provided here, please visit [Lowes.com](#), search the item number and refer to the Guides & Documents on the product’ s page.

Gracias por comprar este producto PROJECT SOURCE. Hemos creado estas instrucciones fáciles de seguir para garantizar que pase su tiempo disfrutando el producto en lugar de armándolo. No obstante, si necesita más información que la entregada aquí, visite [Lowes.com](#), busque el número de artículo y consulte la pestaña Guides & Documents (Guías y documentos) en la página del producto.

TROUBLESHOOTING/SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEM PROBLEMA	POSSIBLE CAUSE CAUSA POSIBLE	CORRECTIVE ACTION ACCIÓN CORRECTIVA
The four feet are not stable and shaking. Las cuatro patas no son estables y tiemblan.	1.The four feet are not stable and shaking. Las cuatro patas no son estables y tiemblan. 2.Screws are not tightened. Los tornillos no están apretados.	1.All adjustable legs are snapped in the same hole position. Todas las patas ajustables se encajan en la misma posición de los orificios. 2.Tighten all screws. Apriete todos los tornillos.

CARE AND MAINTENANCE/CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Clean with soft, damp cloth only. DO NOT USE scrub pads, detergents or cleansers as they may harm the protective finish of your bath accessories.
- Limpie solo con un paño suave humedecido. NO USE almohadillas para frotar, detergentes ni limpiadores, ya que pueden dañar el acabado protector de sus accesorios para baño.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY/GARANTÍA LÍMITADA DE UN AÑO

- This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This One Year Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service. This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable. Parts found to be defective or damaged can be easily ordered by calling Customer Service at **866-389-8827**, 8 a.m. - 8 p.m., EST, Monday-Sunday, or at **ascs@lowes.com**. Proof of purchase (original sales receipt) from the original consumer purchaser must be made available for all warranty claims.
- Este dispositivo se fabricó según estándares exactos y se inspeccionó cuidadosamente antes del envío. Esta garantía limitada de un año es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la mano de obra de nuestros productos y nuestra certeza para el consumidor de años de servicio confiable. Esta garantía no cubre la falla del dispositivo debido al mal uso o la negligencia del propietario. ni al desgaste normal. La garantía no se extiende a los componentes perecederos. Las piezas que se consideren defectuosas o dañadas pueden pedirse fácilmente llamando al Departamento de Servicio al Cliente al **866-389-8827**, de lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m.hora estandar del Este, o escribiendo a **ascs@lowes.com**. El comprador o cliente original debe estar disponible para todos los reclamos de garantía.

PREPARATION/PREPARACIÓN




- Before beginning assembly, remove all parts from carton. Compare parts with package contents list and hardware contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to mount or use the product.
- Antes de comenzar a ensamblar el producto, retire todas las piezas de la caja. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y la lista de aditamentos. No intente montar ni usar el producto si falta alguna pieza o si estas están dañadas.

- **Estimated Assembly Time:** Approximately 10 minutes.
- **Temps d’assemblage approximatif:** Aproximadamente 10 minutos.

- **TOOLS REQUIRED/HERRAMIENTAS NECESARIAS:** No tools required/ No se necesitan herramientas

FEELING CONFIDENT? START YOUR NEXT PROJECT/SE SIENTE CONFIADO? INICIE SU PRÓXIMO PROYECTO

- Visit [Lowes.com](#) for more information. /Para obtener más información, visite [Lowes.com](#).

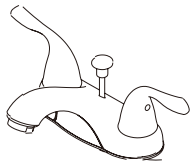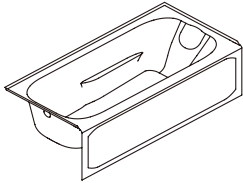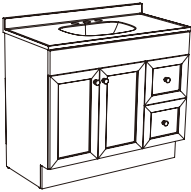


Printed in China
Impreso en China


SAFETY INFORMATION/INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Inspect all parts for shipping damage before assembly. If there is shipping damage - DO NOT USE. Contact dealer/carrier for further instructions.
- Inspeccione todas las piezas en busca de daños durante el transporte antes del ensamblaie. Si hay daños durante el transporte, NO LO USE. Póngase en contacto con el distribuidor o transportista para obtener más instrucciones.
- Make certain that the height adjusting snap buttons fully protrude through the same respective hole of each leg extension. This will ensure that leg extensions are securely locked in position and an even height is achieved.
- Asegúrese de que los botones a presión de ajuste de altura sobresalgan completamente a través del mismo orificio respectivo de cada extensión de pata. Esto asegurará que las extensiones de las patas queden bloqueadas de forma segura en su posición y se logre una altura uniforme.
- Check the rubber tips on the leg extensions for rips, wear or if they are missing. Immediately replace any or all if any of these imperfections exist.
- Revise las puntas de goma de las extensiones de las patas para ver si están rascadas, desgastadas o si no están en su lugar. Reemplace inmediatamente las puntas de goma si existe alguna de estas imperfecciones.
- All four leg extensions with rubber tips MUST touch the floor simultaneously at all times.
- Las cuatro extensiones de las patas con puntas de goma DEBEN tocar el suelo simultáneamente en todo momento.
- DO NOT stand on chair.
- NO se pare en la silla.
- Don't fasten screws tightly before having assembled all the parts. All screws shall be secured after finishing the product assembly.
- No apriete los tornillos con fuerza antes de haber ensamblado todas las piezas. Todos los tornillos se asegurarán después de finalizar el montaje del producto.
- Periodically retighten all wing knob screws on the shower chair.
- Vuelva a apretar periódicamente todos los tornillos de perilla de ala de la silla de ducha.


PACKAGE CONTENTS/CONTENIDO DEL PAQUETE

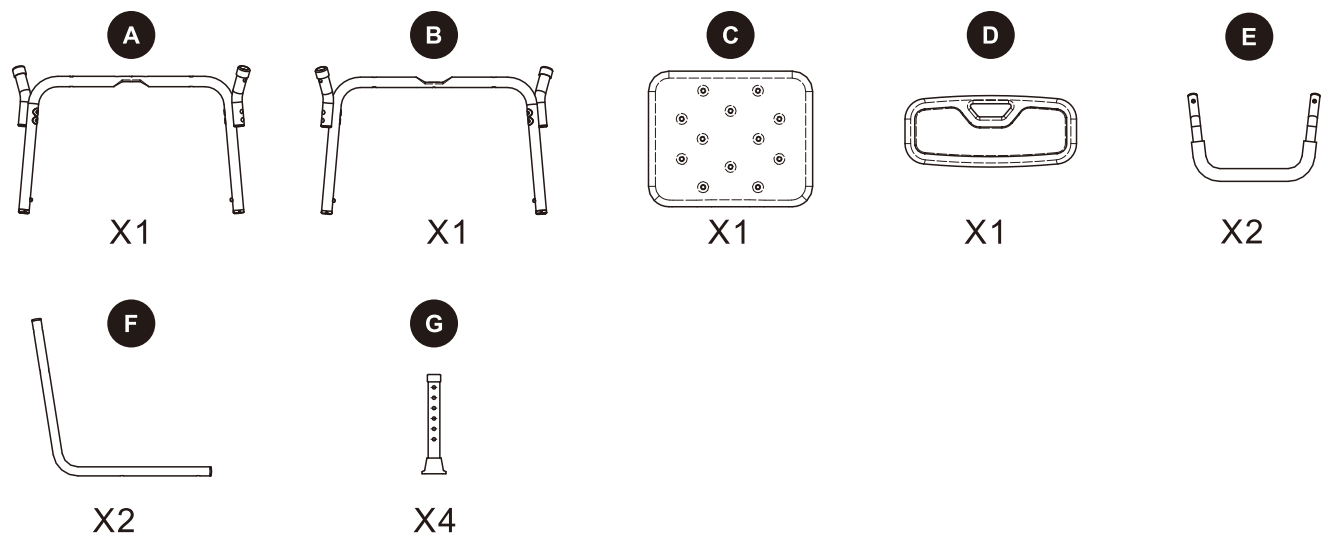

HARDWARE CONTENTS/ADITAMENTOS

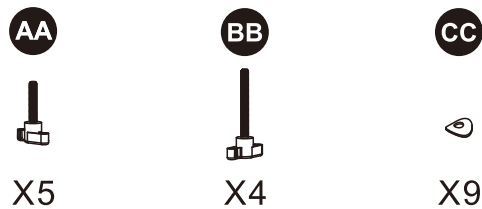


INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

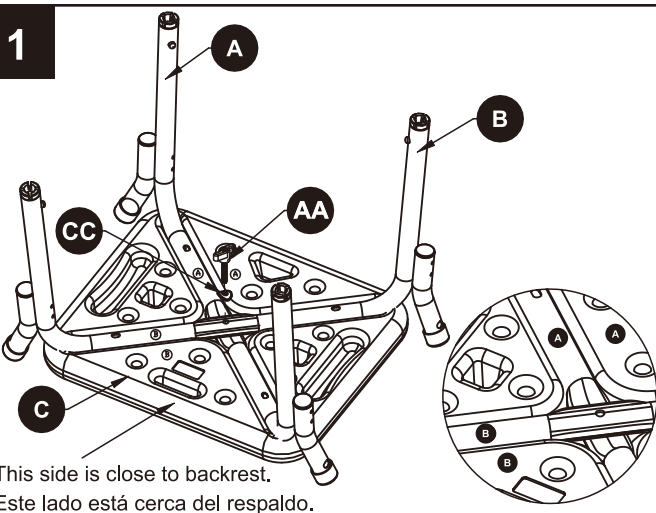

This side is close to backrest.
Este lado está cerca del respaldo.

Lay seat panel (C) upside down. Place upper frame tubing (A) in the indent labeled "A" with the leg facing upwards, then place lower frame tubing (B) in the indent labeled "B" with the leg facing upwards crossing over the upper frame tubing (A). Place wave washers (CC) onto the shaft of short wing knob screws (AA) with the arc facing down, then turn the short wing knob screw (AA) into the center screw hole of the leg section. Do not tighten the screw completely.

Coloque el panel del asiento (C) boca abajo. Coloque el tubo de estructura superior (A) en la ranura marcada "A" con la pata hacia arriba, luego coloque el tubo de estructura inferior (B) en la ranura marcada "B" con la pata hacia arriba cruzando por encima del tubo de estructura superior (A). Coloque las arandelas onduladas (CC) en el eje de los tornillos de perilla de ala corta (AA) con el arco hacia abajo, luego gire el tornillo de perilla de ala corta (AA) en el orificio central para tornillos de la sección de la pata. No ajuste el tornillo por completo.

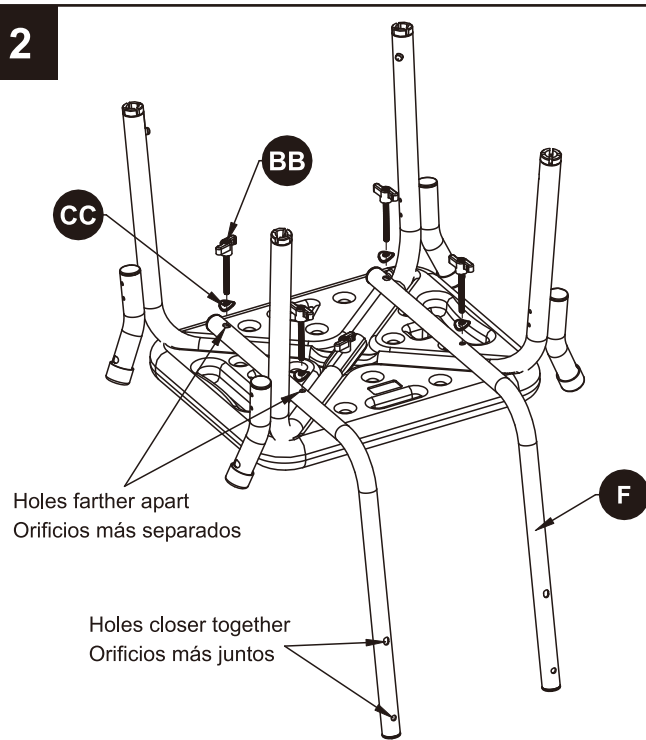


Holes farther apart
Orificios más separados

Holes closer together
Orificios más juntos

Attach metal tubing (F) to frame tubing and seat panel by placing wave washers (CC) onto the shaft of long wing knob screws (BB) and tightening them by hand.


Conecte el tubo de metal (F) al tubo de estructura y al panel del asiento colocando las arandelas onduladas (CC) en el eje de los tornillos de perilla de ala larga (BB) y apretándolos con la mano.

INSTALLATION OVERVIEW/DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN

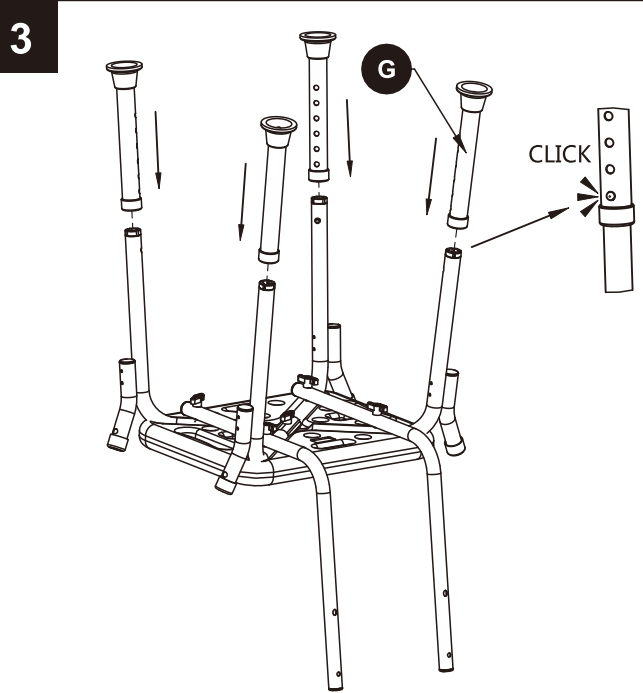


Attach the adjustable legs (G) to frame tubing by pressing the pin button in while sliding over the frame tubing until the pin button protrudes.

Fije las patas ajustables (G) al tubo de estructura presionando el botón del pasador mientras se desliza sobre el tubo de estructura hasta que el botón del pasador sobresalga.

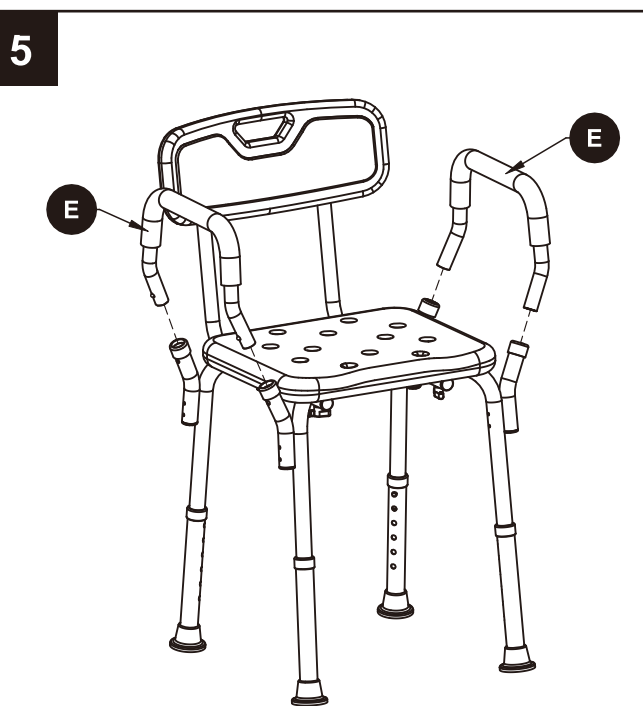


Attach the armrest (E) to frame tubing by pressing the pin button in while sliding into frame tubing until the pin button protrudes.

Fije el apoyabrazos (E) al tubo de estructura presionando el botón del pasador mientras se desliza en el tubo de estructura hasta que el botón del pasador sobresalga.

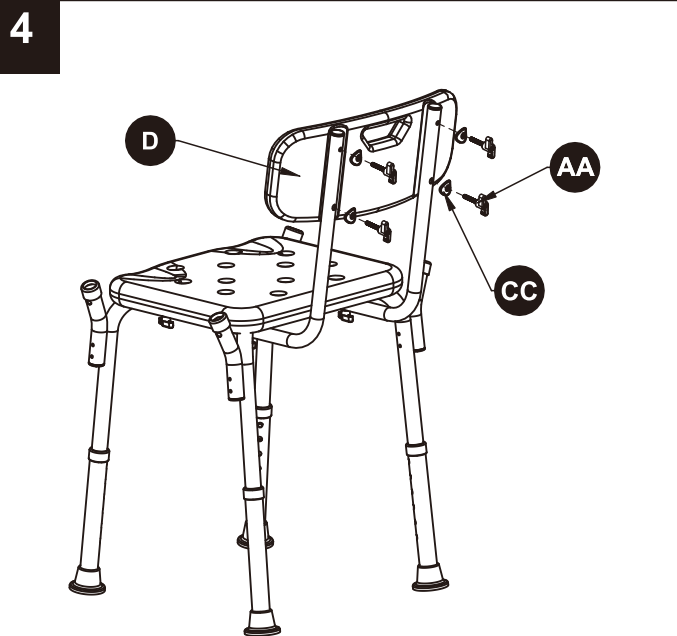

Lay the shower chair right side up. Attach backrest panel (D) to metal tubing by placing wave washers (CC) onto the shaft of short wing knob screws (AA) and tightening them by hand.

Coloque la silla de ducha boca arriba. Fije el panel del respaldo (D) al tubo de metal colocando las arandelas onduladas (CC) en el eje de los tornillos de perilla de ala corta (AA) y apretándolos con la mano.

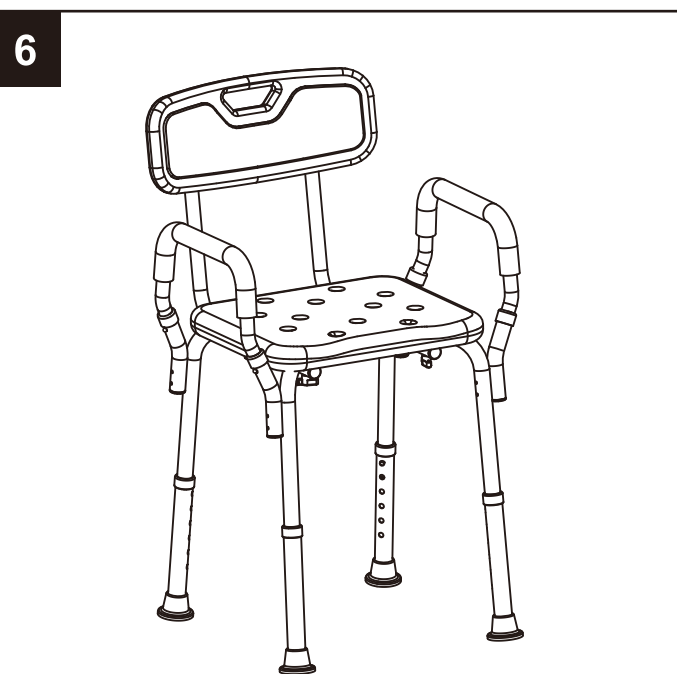

Tighten all wing knob screws completely.

Apriete completamente todos los tornillos de perilla de ala.